

供血用遠心分離器

 **HAKUHO**  
GOOD INNOVATION PARTNER

# メディフュージ MEDIFUGE

添加物を一切用いない、完全自己血液由来のフィブリンゲル



供血用遠心分離機  
**メディフュージ** 製品番号/C00020

▶ 13分間で自動的にフィブリンゲルが作製されます。



**point1 簡単**

セットしてスタートボタンを押すだけ

**point2 迅速**

遠心操作は一回のみで、遠心時間13分

「メディフュージ」で遠心分離を行うことにより、血液中の血小板や赤血球が分離されます。それと同時に、血液中の凝固因子が自然に刺激されてフィブリンゲルが形成されます。このフィブリンゲルは、成長因子や血小板などを多く含むうえ、添加物を一切用いないため、完全自己血液由来のゲル素材といえます。

**操作方法**



- ① 採血後、すぐにセットする。      ② スタートボタンを押し、遠心開始。  
 ③ 遠心分離後の様子。              ④ 採取したフィブリンゲル。

※ なるべく早く遠心にかけてください。すぐに凝固が始まるので、時間がたつとフィブリンゲルの作製効率下がることがあります。  
 ※ フィブリンゲルの大きさや色などには個人差があります。

**CHECK!**

- ◆ 最大8本まで血液サンプルのセットが可能
- ◆ UV サイクルを搭載  
 UV ランプ(殺菌灯)により、装置内側を殺菌することができます。
- ◆ オートクレーブ耐性  
 内部のホルダーは、オートクレーブ滅菌することが可能です。



電源電圧	AC 100 V (50/60 Hz)
定格電力	120 VA
本体重量	9.4 kg
本体サイズ	W 280 × D 320 × H 240 mm

医療機器届出番号：13B1X101000000004

●販売元 zimmer dental社 輸入販売元  
**株式会社 白 鵬**  
 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-3-23



製造販売業者 コアフロント株式会社  
 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2-11  
 TEL.03-5579-8710

製造元  
 SILFRADENT S.R.L. (Italy)  
 シルフラデント エスアールエル



●より詳しいご説明をご希望される場合、資料請求、研修案内をご希望の場合は下記までご連絡ください。 イイハ オハヨー  
**TEL.03-3265-6252 FAX. ☎ 0120-118-084**  
 [Spline インプラントシステムのセミナーを全国で開催しております] <http://www.hakuho-d.com/>